



I FACCIALI FILTRANTI: COME SI INDOSSANO

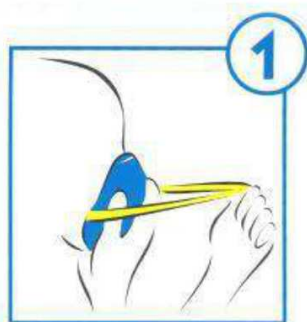

1. prendere la mascherina dalla parte della conchiglia e premere il facciale contro il viso con il fermanaso sopra il ponte del naso

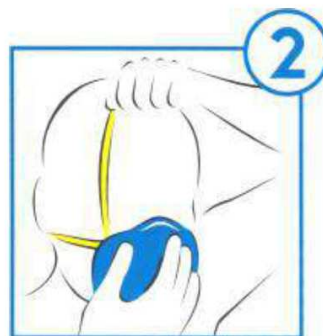

2. tirare l'elastico inferiore sopra la testa e posizionarlo sotto le orecchie e allo stesso tempo tirare e posizionare l'elastico superiore sulla sommità della testa



3. usare entrambe le mani per modellare il fermanaso metallico alla forma del vostro naso.



4. effettuare il test di controllo: portare le mani sulla mascherina e espirare vigorosamente: se si avverte flusso d'aria attorno al naso, posizionare nuovamente il respiratore.

Come si rimuovono ?

toccare solo le stringhe e non la superficie contaminata

Avvertenze

- Rimuovere immediatamente le mascherine una volta che si è finita l'attività per le quali è obbligatorio l'utilizzo ed eliminarle.
- Se la mascherina viene strappata o comunque danneggiata deve essere rimossa immediatamente.